

PROCEDURA WYKONANIA TESTU ANTYGENOWEGO W KIERUNKU
SARS-COV-2, GRYPY TYPU A I GRYPY TYPU B

1. Umyć ręce.
2. Założyć rękawiczki.
3. Otworzyć opakowanie z kasetką testową (**uwaga:** kasetka nie może pozostać na powietrzu dłużej niż godzinę przed wykonaniem testu) .
4. Otworzyć probówkę z buforem i wstawić do statywu.
5. Wyjąć wymazówkę ze sterylnej opakowania.
6. Włożyć wymazówkę do nozdrza na głębokość 2,5 cm.
7. Wykonać 5 ruchów rotacyjnych dociskając lekko wymazówkę do ścianek nosa.
8. Powtórzyć procedurę 6. i 7. w drugim nozdrzu.
9. Włożyć wymazówkę do probówki z buforem.
10. Wykonać 10 ruchów rotacyjnych dociskając wymazówkę do ścianek probówki.
11. Ścisnąć 5 razy "główkę" wymazówki (wymazówka znajduje się w buforze, ściskamy "główkę" od zewnątrz probówki).
12. Podnieść wymazówkę nad bufor i ścisnąć "główkę" jeszcze raz (ponownie od zewnątrz probówki).
13. Złamać trzonek wymazówki w zaznaczonym miejscu ("główka" i część trzonka pozostaje w probówce).
14. Zamknąć probówkę częścią zakraplającą.
15. Dodać 4 krople z probówki do dołka testowego na kasetce.
16. Odczytać wynik na polu testowym po 15-20 minutach.