



# Instrukcja wykonania testu antygenowego




Kasetkę testową należy wyjąć z zamkniętej torebki foliowej i jak najszybciej użyć. Najlepsze wyniki uzyskamy, jeśli test zostanie przeprowadzony natychmiast po otwarciu torebki foliowej,

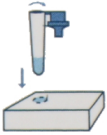

Ustawić opakowanie służące jako podstawka tak, aby móc włożyć tam probówkę z buforem, następnie usunąć zabezpieczenie/nasadkę probówki ekstrakcyjnej,

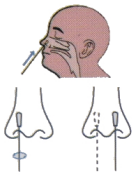


Wyjąć wymazówkę z opakowania i pobrać materiał do badania z przedniej części nosa, kilka razy lekko kręcąc wymazówką przy ścianie nosa,

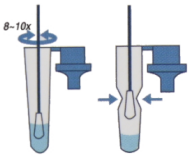

Włożyć wymazówkę do probówki ekstrakcyjnej z buforem. Obracać wymazówkę przez ok. 10 sekund, dociskając główkę do dna i ścianki probówki. Kilkakrotnie ścisnąć probówkę, aby dokładnie zanurzyć wymazówkę w buforze. Następnie ją wyjąć. Wyrzucić wymazówkę zgodnie z zasadami usuwania odpadów medycznych,



Zamocować nasadkę na probówce z pobranym materiałem,

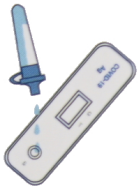


Nalać 3 krople uzyskanego roztworu z próbką materiału do okienka na teście, a następnie uruchomić timer.



10~15 Min

Odczekać do pojawienia się kolorowych linii. Wynik odczytać po upływie 10-15 minut.

## Interpretacja wyniku

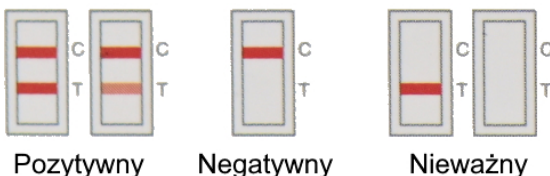

**UWAGA:** Nie interpretować wyniku po 20 minutach.